

ENTRENAMIENTO

REGIONAL NO – VARIX®

Mayo, 2018



No-Varix[®]

MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

No-Varix[®]

MEDIAS MEDICADAS/MEDICAL STOCKINGS

**Medias medicadas de
compresión graduada**

compresión graduada
Medias medicadas de

¿Qué son las várices? (I.V.C.)

Las várices son desórdenes venosos manifestados con dilatación y tortuosidad de las venas superficiales de las piernas.


La paredes de las venas se debilitan produciendo dilatación de las mismas, la incidencia de esta enfermedad se incrementa con la edad.

Este problema circulatorio, se presenta en mayor porcentaje en mujeres que en hombres.


Válvulas del sistema venoso



Válvulas Venosas

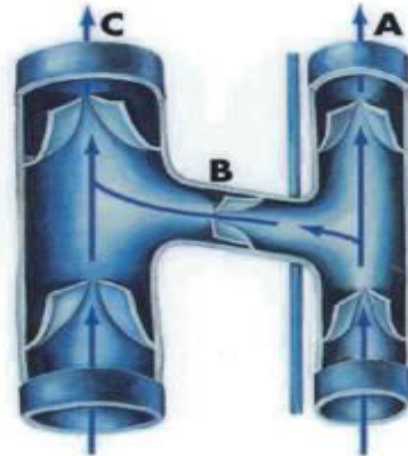

Sistema Venoso Sano

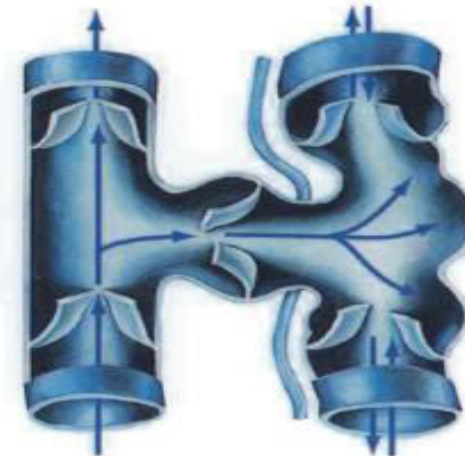

Várices

Factores de Riesgo

Constitucionales

Edad Avanzada



Obesidad



Herencia
 (Historia familiar de enfermedad similar)



Situacionales

Posición de pie
 Por periodos prolongados



Posición sentado
 Por periodos prolongados



Sedentarismo



Uso de calzado de tacón muy elevado



Ausencia de Ejercicio



Embarazo Multiparidad




Exposición al calor por sol



Prendas de Vestir Ajustadas



Uso de Anticonceptivos

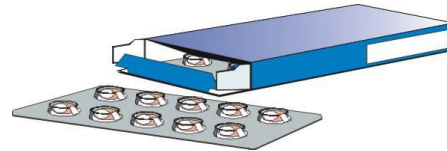

¿Cuáles son los tratamientos?

Terapia invasiva



- **SAFENECTOMIA:** es la cirugía para extirpar venas varicosas de las piernas. Estas venas se extirpan debido a que son grandes y dolorosas y afectan la apariencia de las piernas.
- **E.N.O.F:** Espuma de oclusión endoluminal guiada por catéter Ecoasitado, Lo que hace es fibrosar (volver inservible) la vena Safena mediante fibrosis química.
- **ESCLEROTERAPIA:** Es un procedimiento ambulatorio no quirúrgico diseñado para atenuar el aspecto de arañas **vasculares** y várices pequeñas y superficiales. A través de la **escleroterapia** se pueden eliminar las antiestéticas venas varicosas que aparecen en las piernas, el rostro o prácticamente cualquier parte del cuerpo.

*** FARMACOLOGICOS**

¿Cuáles son los tratamientos?



Terapia no invasiva



EFFECTOS DE LA TERAPIA:

- Mejora el reflujo venoso
- Refuerzo de las bombas musculares
- Reducción de la presión en el sistema venoso
 - Reducción del edema



¿Qué es la compresión graduada?

La compresión graduada obliga a las venas a comprimirse a su diámetro normal haciendo que las válvulas funcionen normalmente.

El efecto es incrementar la velocidad del fluido sanguíneo y contrarrestar la presión venosa aumentada, esto combinado sobre la macro y micro circulación explica la eficacia del tratamiento.

Beneficios de la compresión progresiva

Ayuda al retorno venoso evitando:

- Inflamación
- Dolor

Es la **terapia de alta eficacia y eficiencia** en la prevención y tratamiento de la insuficiencia venosa y enfermedad varicosa



Es una excelente elección para:

- **Prevención**
- **Tratamiento**
de las várices

Eliminando:

- El cansancio
- El dolor
- La inflamación
- Los calambres
- Sensación de calor
- Sensación de Hormigueo
- Favorece la salud de los usuarios
- Reduce el edema



No!


Entrenamiento Regional No - Varix ®



Medias de
Compresión
progresiva
Para Dama y Caballero




Beneficios de la compresión progresiva

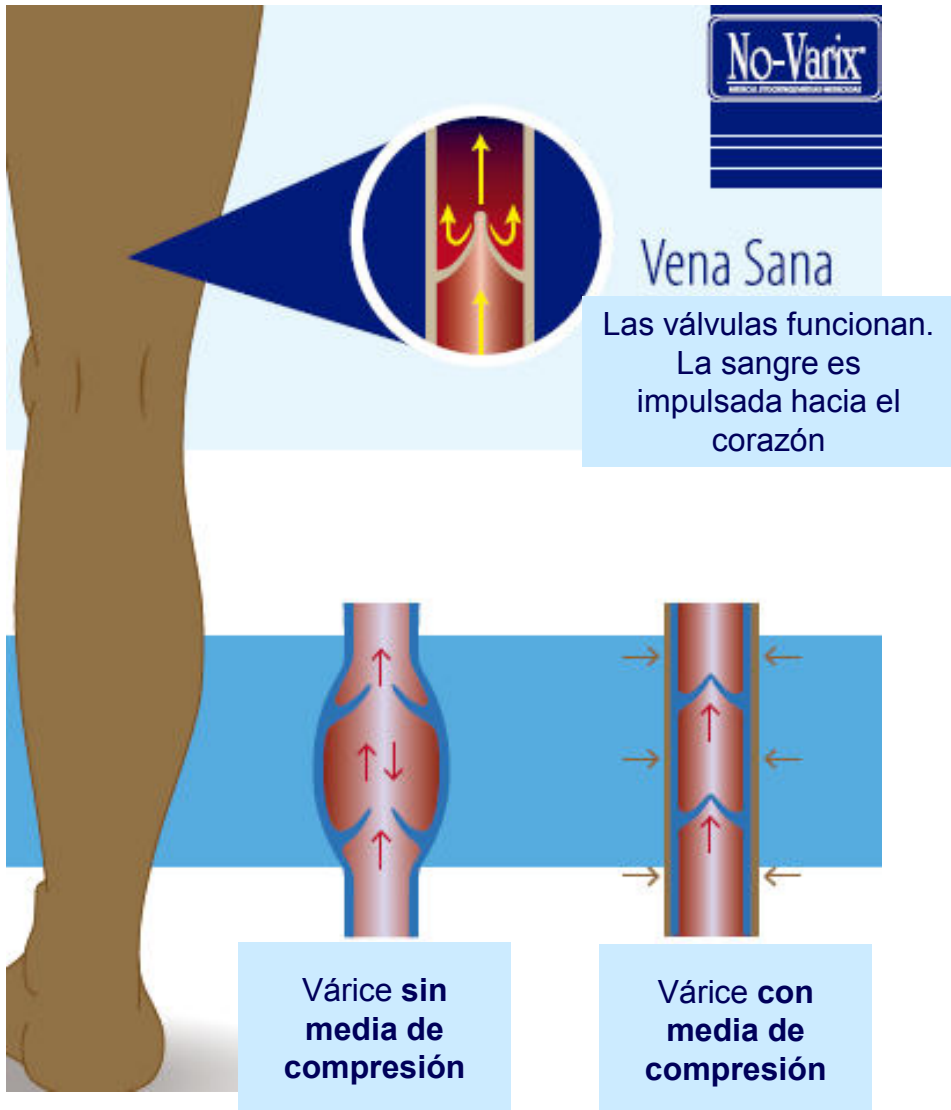

La compresión progresiva obliga a las venas a comprimirse a su diámetro normal haciendo que las **válvulas funcionen normalmente**

COMO ACTUA LA COMPRESION GRADUADA?


Sin medias medicadas de compresión graduada

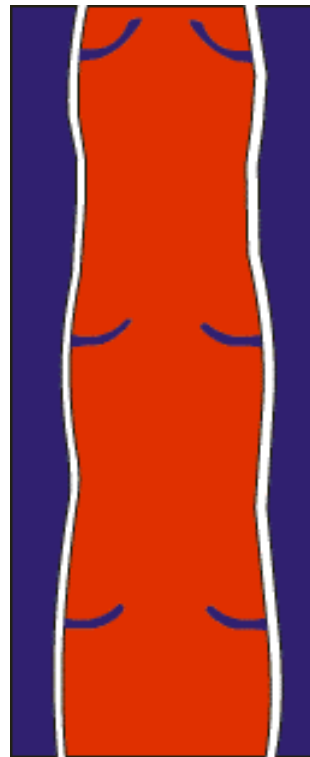

Válvulas afectadas

COMO ACTUA LA COMPRESION GRADUADA?


Usando medias medicadas de compresión graduada

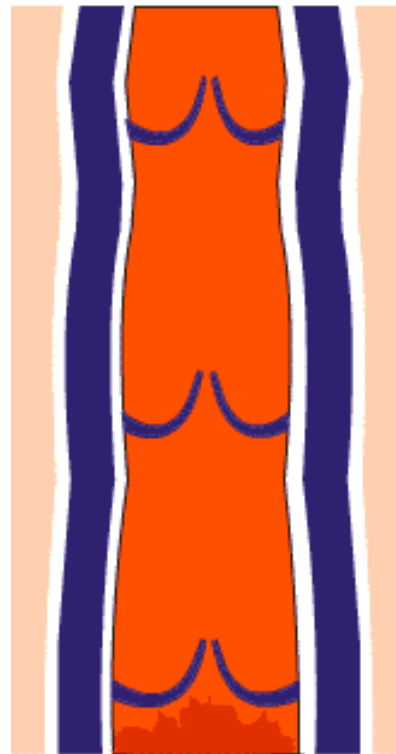


Válvulas Normales, funcionando



TERAPIA COMPRESIVA

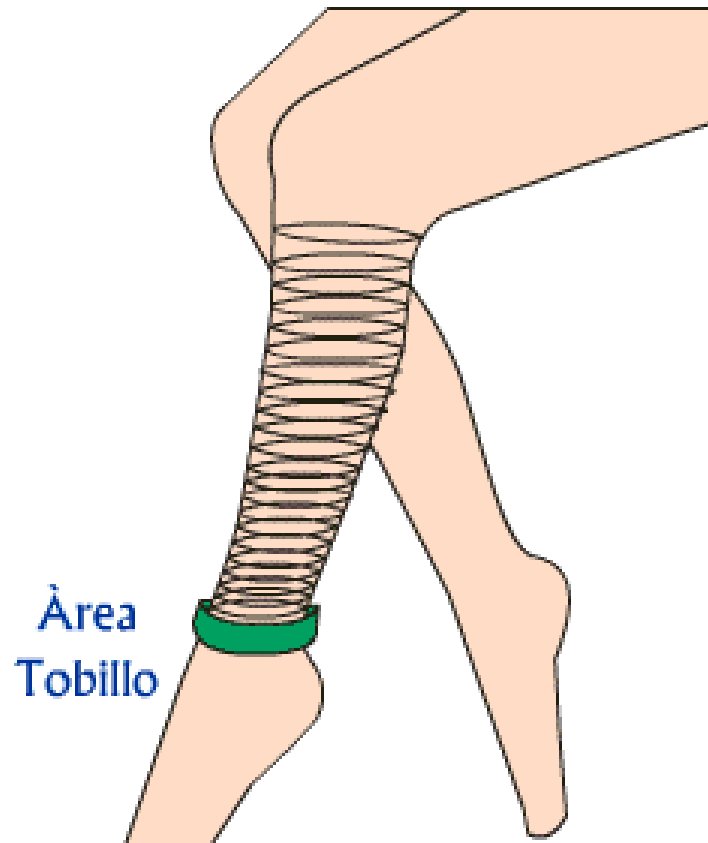

Máxima compresión en el tobillo, disminuyendo gradualmente a lo largo de la pierna

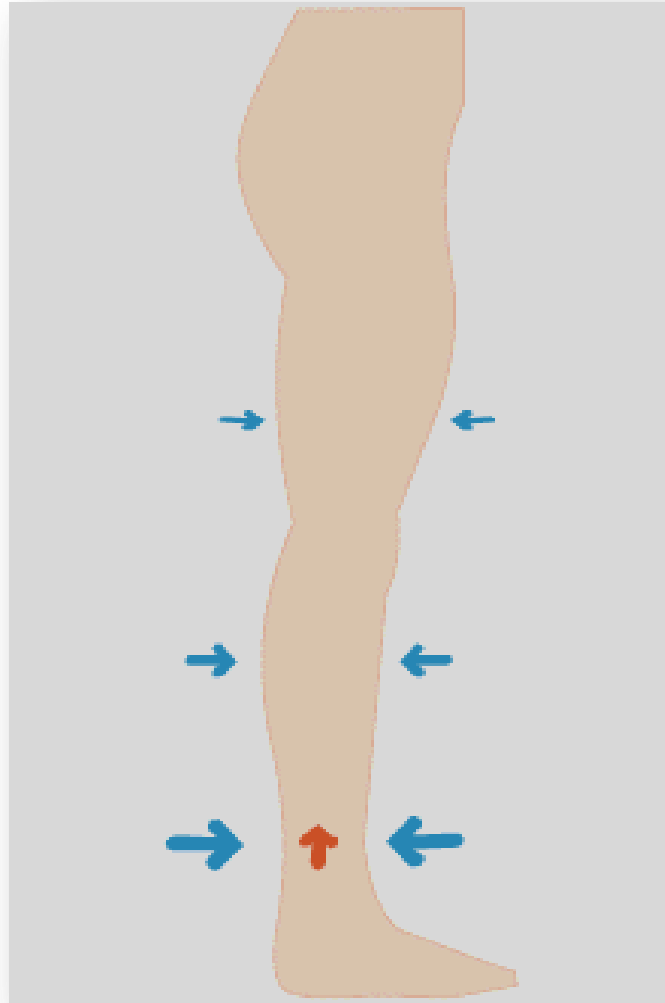

La compresión
disminuye
gradualmente con
dirección al corazón



Manufacturadas en Colombia, por:



*Una de las mejores compañías a nivel mundial que fabrica
Medias de compresión graduada*



América



Reino Unido



Nuestras Certificaciones



SC-CER551799



DM-CER551802



Texpon S.A., es una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos de compresión progresiva. Cuenta con avanzados equipos de medición de mmHg, calibrados por entes certificados mundialmente.

Personal calificado y entrenado por expertos internacionales de empresas con más de 40 años en el mercado de productos compresivos.


Contamos con proveedores calificados que cumplen con la responsabilidad social y ambiental bajo los certificados Oekotex.

Con certificación **ISO** desde el año 2002. En la actualidad contamos con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la Norma **ISO 9001:2015, ICONTEC - IQNet** y para el manejo de dispositivos médicos bajo la norma **ISO 13485:2016, ICONTEC - IQNet**.

Fibras de última generación para la fabricación de medias de compresión progresiva: naturales como el algodón y sintéticas como el supplex o las microfibras, también antibacteriales como hilos de plata y de cobre.

Spandex (elastómeros) de doble recubrimiento para garantizar la compresión y mayor durabilidad.

Nuestras máquinas de tejido circular son diseñadas exclusivamente para la elaboración de las medias de compresión progresiva.

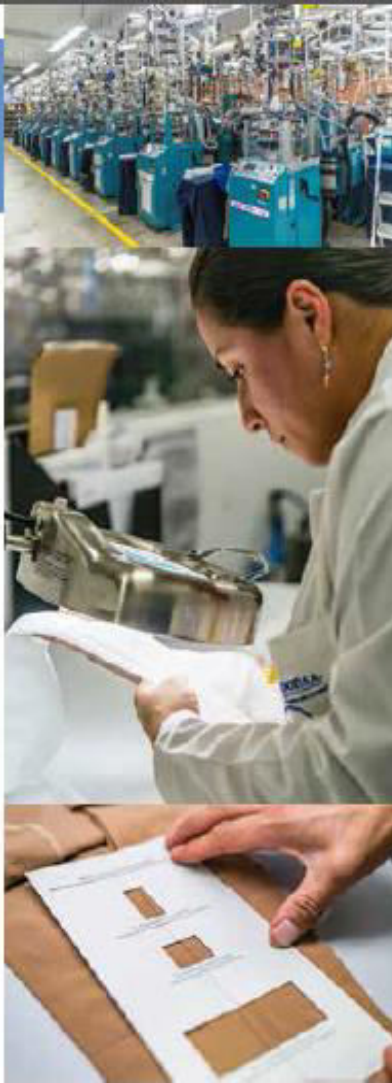

POR QUE USAR MEDIAS NO-VARIX®



- Maquinaria de precisión de última tecnología.
- Proveedores calificados y certificados con materia prima e insumos de alta calidad.
- TEXPON S.A. es la única compañía certificada ISO 9001:2008 de Latinoamérica. Ahora certificados con la Norma 13485:2016 para Dispositivos Médicos.
- Nuestro compromiso: Estilo, Talla, Textura, Color y Compresión. Tenemos el catálogo más amplio en medias medicadas,
- No-varix® marca acreditada a nivel médico, garantizamos un producto que cumple requisitos exigidos a nivel internacional y normas legales
- Las devoluciones son un Indicador de nuestra calidad vs. precio del producto. Año 2.017 fue 0,031% (236 prs devueltos vs 702.540 prs despachados)
- Fibras inteligentes especializadas para fabricar medias de compresión graduada como: Algodón – Hilos de plata –suplexx –Hilos con fusión de cobre




Calidad y compresión progresiva garantizada



Médicamente diseñadas con **tecnología de avanzada** y **materias primas de última generación**

- ✓ Supplex
- ✓ Algodón
- ✓ Lycra
- ✓ Wood silk (rayón)
- ✓ Microfibras

**Más filamentos, más suavidad,
mejor transpiración**

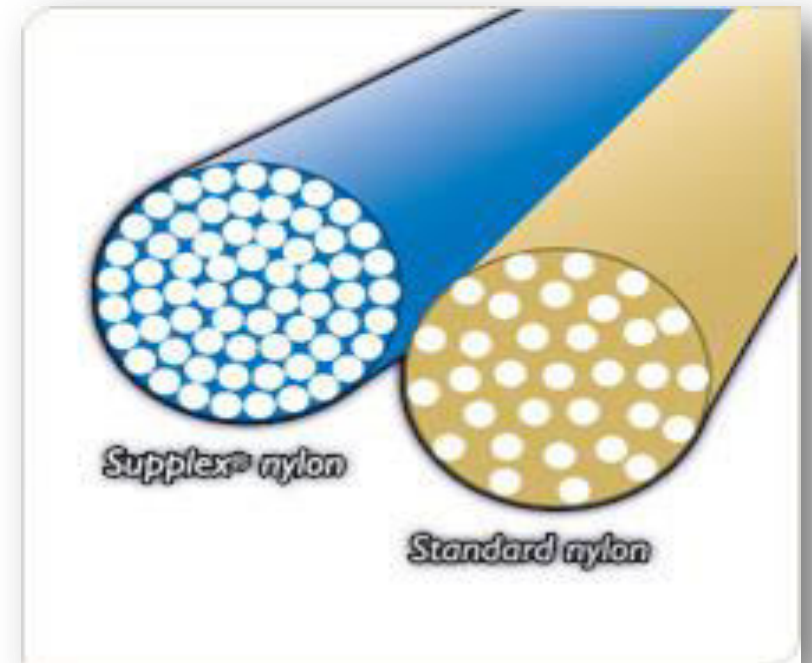

Características de nuestros hilos



Recubrimientos:



Simple



El recubrimiento sencillo puede fácilmente girarse y tener más viveza que hace que toda la media medicada se tuerza (no permanece recta)



Tiene menor elongación, menor resistencia y por lo tanto hace que el producto pierda su fuerza y compresión en menor tiempo afectando la calidad, porque tendría menor durabilidad. Se utiliza para elaborar media tradicional.



Doble




El doble recubrimiento es normalmente usado en medias medicadas porque en circulares o vanizado es usado el recubrimiento sencillo. Los hilos para media medicada tienen alta elongación que es mucho más fácil alcanzar con doble recubrimiento que con sencillo.



Mayor elongación, resistencia, fuerza y asegura que la compresión ejercida se mantenga. Mantiene en el producto un tejido parejo. Son las fibras que utilizamos en Texpon S.A.

Clases de Hilos:

Nylon Rígido

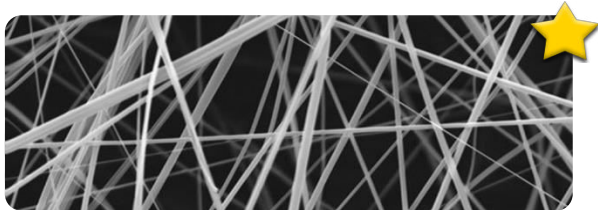


El Nylon rígido es la fibra que se utiliza para elaborar la media transparente, simplemente es el diferencial entre ésta media y la opaca, ya que para ésta última se utiliza Nylon texturizado.

Elastómero recubierto



Es una fibra que tiene la propiedad de brindar elongación y volver a su origen sin que se rompa, es flexible y confortable.

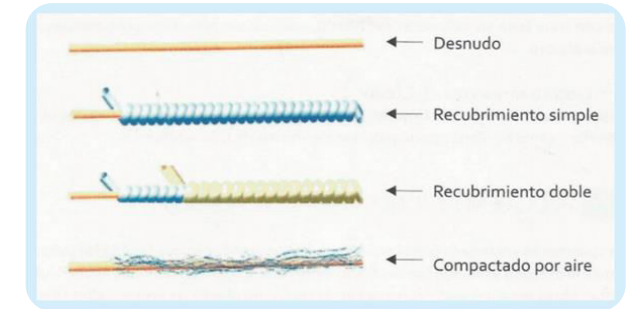

TESTERS



Chatillón (U.S.A)

Hatra (Inglaterra)

Salzmann (Suiza)

Clasificación CEAP
de la enfermedad
venosa crónica

C0

A-C1

B-C2

C-C3

Clasificación clínica

Ningún signo visible o palpable de enfermedad venosa
Telangiectasias o venas reticulares

Venas varicosas

Edema

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

Baja Compresión

Clase 0

8-15 mmHg

Ningún signo visible o palpable
de enfermedad venosa.

Mediana Compresión

Clase A-C1

Terapéutica
15-20 mmHg

Insuficiencia Venosa Crónica,
Venas Reticulares,
Post Escleroterapia,
Control de los síntomas.

Firme Compresión

Clase B-C2

Terapéutica
20-30 mmHg

Cirugía Endovascular,
E.N.O.F.,
Trombosis Venosa,
Post Escleroterapia,
Venas tronculares.

Extra Firme Compresión

Clase C-C3



Terapéutica
30-40 mmHg

Linfedema de cualquier
etiología y secuelas de
difícil control.

Baja Compresión 8- 15 mm Hg Dama

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

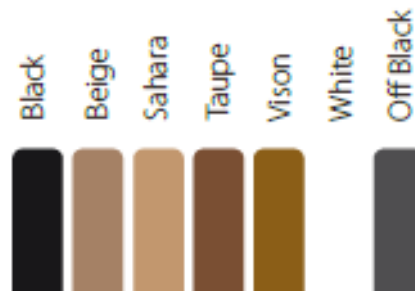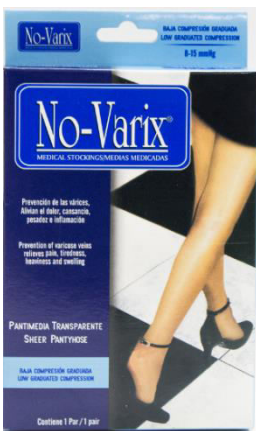


- Profilácticas: prevenir los síntomas y molestias del síndrome de Piernas cansadas
- Medias de descanso para pacientes Sin signos visible o palpable de enfermedad Venosa
- Telangiectasias
- Venta sin prescripción medica
- Gracias a su tejido elástico se adaptan y se ajustan las piernas noten una sensación de confort y de alivio instantáneo al utilizarlas
- Elegantes y cómodas
- Textura: Transparente


Baja Compresión 8- 15 mm Hg Dama

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS




R.S. INVIMA 2009DM-0003826

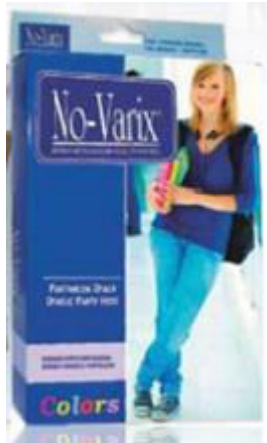

- Colores Modernos para Pacientes Jóvenes
- Extra suaves
- Fácil colocación
- Mayor durabilidad
- Textura : Opaca no se ve la piel

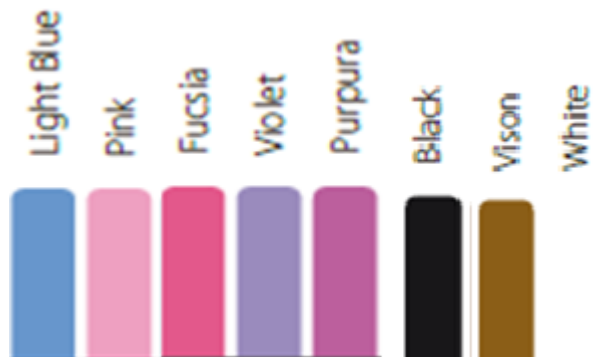


Mediana Compresión 15-20 mm Hg Dama Rodilla

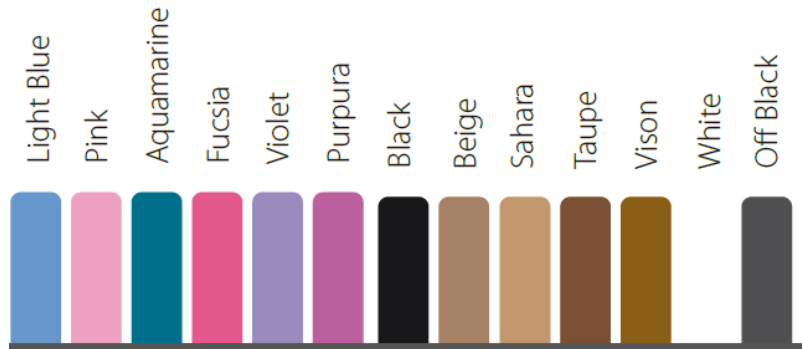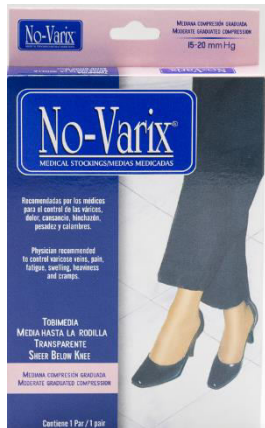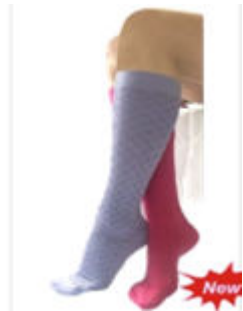

- Insuficiencia Venosa Crónica
- Varices Reticulares
- Post Escleroterapia
- Mas utilizadas por su fácil postura y Costo comparada con las pantimedias
- Mayor durabilidad
- Textura opaca : calcetín mas grueso , Colores modernos para usuarias Jóvenes O personal del área de la salud
- Textura transparente : Elegantes y cómodas para pacientes que gustan vestir pantalón

Mediana Compresión 15-20 mm Hg Dama Muslo

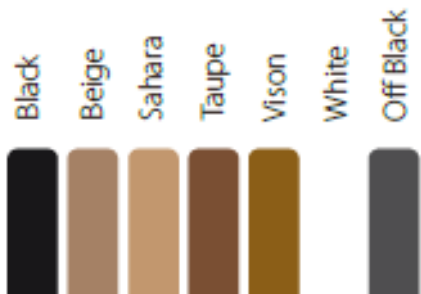

- Cómoda Banda Siliconada de suave adherencia a la piel, no requiere liguero manteniendo la media en su posición
- Atractivo y elegante diseño cosmético transparente
- Refuerzo de talón y puntera
- Sin puntera (Dedos libres)
- Post quirúrgicas
- Usuarías que gusten usar vestido
- Fácil postura
- Textura: transparente

Mediana Compresión 15-20 mm Hg Dama Pantimedia

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826




- Ajuste anatómico en muslo y abdomen
- Elástico afelpado de amplia elongación que evita el Maltrato en la cintura
- Costura plana de mayor durabilidad en el panty
- Refuerzo de algodón en la entrepierna que permite la transpiración
- Refuerzo de talón y puntera / sin puntera
- Reduce el volumen de las varices
- Referencia materna : alivia los síntomas propensos en el embarazo, cómodo diseño de panty con refuerzo de ampliación para adaptarse a la evolución de la gestante
- Usuarías que gusten usar vestido
- Textura: transparente y opaca 4G

Firme Compresión 20-30 mm Hg Terapéuticas

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

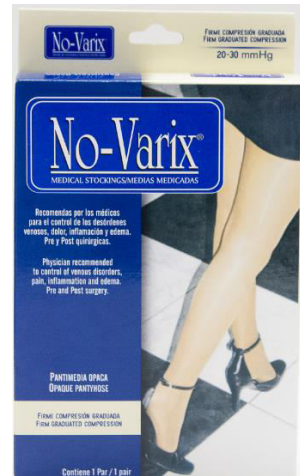

- Indicadas en cirugía Endovascular / ENOF
- Trombosis Venosa Profunda / Varices Tronculares
- Ulceras Varicosas
- Esta compresión debe ir indicada por un especialista
- Estilo hasta la rodilla unisex
- Incluye como accesorio una funda para la postura
- Refuerzo elástico comfortable en la parte superior que evitan oprimir el musculo

EXTRA -FIRME COMPRESION 30-40 mm Hg Terapéuticas

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826




Hasta el hombro,
mano libre, con
banda elástica.

Ref.1048



Desde el bicep
hasta la muñeca,
banda con puntos
de silicona.

Ref.1148

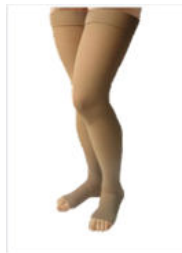

- ❑ Indicada en casos de Linfedema de cualquier Etiología y secuelas de difícil control
- ❑ Disponible en color Beige
- ❑ Estilo unisex
- ❑ Incluye como accesorio una funda para la postura
- ❑ Fibras de Excelente elongación, recuperación y durabilidad asegurando constante compresión
- ❑ La compresión no solo mejora la circulación, sino También ayuda al flujo ascendente del sistema linfático

Baja Compresión 8-15 mm Hg Calcetín Hombre


No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826



- Profilácticas: prevenir los síntomas y molestias del síndrome de Piernas cansadas
- Medias de descanso para pacientes Sin signos visible o palpable de enfermedad Venosa
- Venta sin prescripción medica
- Atractivo y elegante diseño opaco ideal para el uso diario
- Refuerzo en talón y puntera
- Contiene suavizante textil que le da facilidad y elasticidad en la postura


Mediana Compresión 15-20 mm Hg Terapéuticas

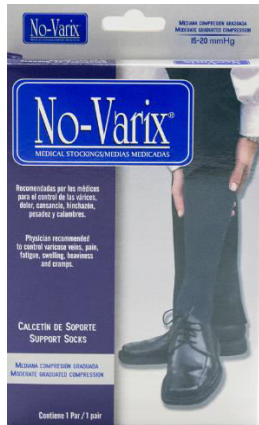

Calcetín para hombre





Ref.66

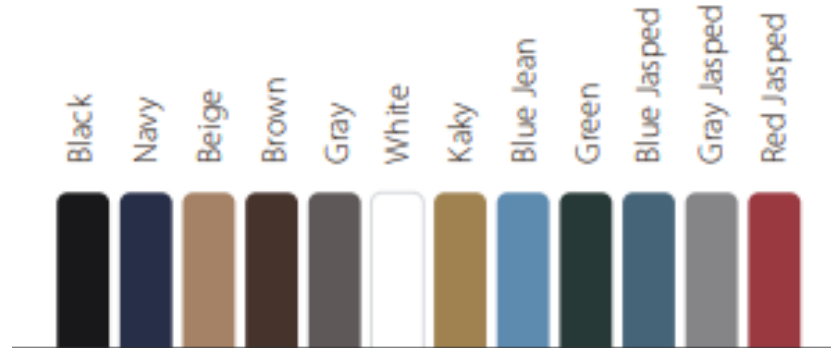

- Calcetín para caballero , refuerzo en talón, puntera y gemelos
- Medicamente recomendadas para el alivio del dolor
- Cansancio, inflamación y pesadez en las piernas
- Elegante diseño opaco ideal para el trabajo y uso diario
- Apariencia y colores de moda para hombres de negocios

Extra Firme Compresión 30-40 mm Hg Terapéuticas

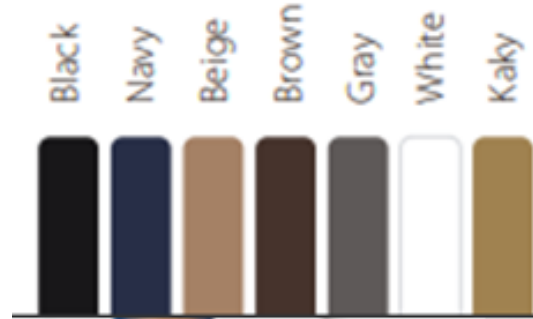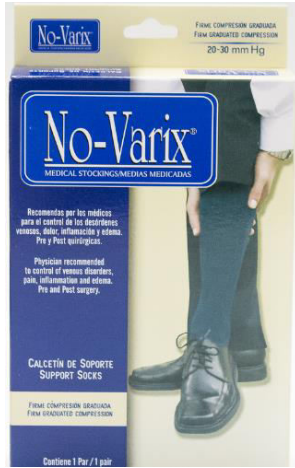

- Medias Leotardo tipo bóxer opaco para caballero con refuerzo en talón y puntera, disponible en color azul
- Amplia puntera para libertad de movimiento
- Para el calcetín: Refuerzo elástico confortable en la parte superior que evitan oprimir el musculo
- Prescripción medica



T.V.P.® Medias Anti embolicas



En todas las cirugías, es protocolo en muchos hospitales del mundo, el uso de medias anti embolicas, para prevenir la Trombosis Venosa profunda T.V.P.

Se han producido varias muertes por la T.V.P. El permanecer acostado, durante y después de los procedimientos, se produce estasis venoso y es una de las causas para desarrollar trombos, que pueden desprenderse de las paredes de las venas y viajar hacia el pulmón ó el cerebro, el uso de medias ayuda a que aumente la velocidad de la sangre y es uno de los métodos de más uso a nivel mundial, para ayudar a prevenir la T.V.P.

Objetivo: Mantener el el retorno venoso normal en un paciente postrado en cama.

Una regla empírica simple:

Si el paciente está postrado en cama = medias anti embolica

Si el paciente es ambulatorio = medias médicas de compresión graduada

T.V.P.® Medias Antiembolicas 18 mm Hg



Estilos

- Hasta la rodilla
- Hasta el muslo
- Hasta el muslo con cinturón


Indicaciones

- ✓ Terapéutica

Reducen el riesgo del trombo embolismo pulmonar, varico - trombosis y trombosis venosa profunda T.V.P. Pacientes de cirugía ortopédica, rodilla , cadera, Cirugías estéticas, pacientes quirúrgicos bajo , mediano y alto riesgo



T.V.P.® Medias Antiembólicas 18 mm Hg

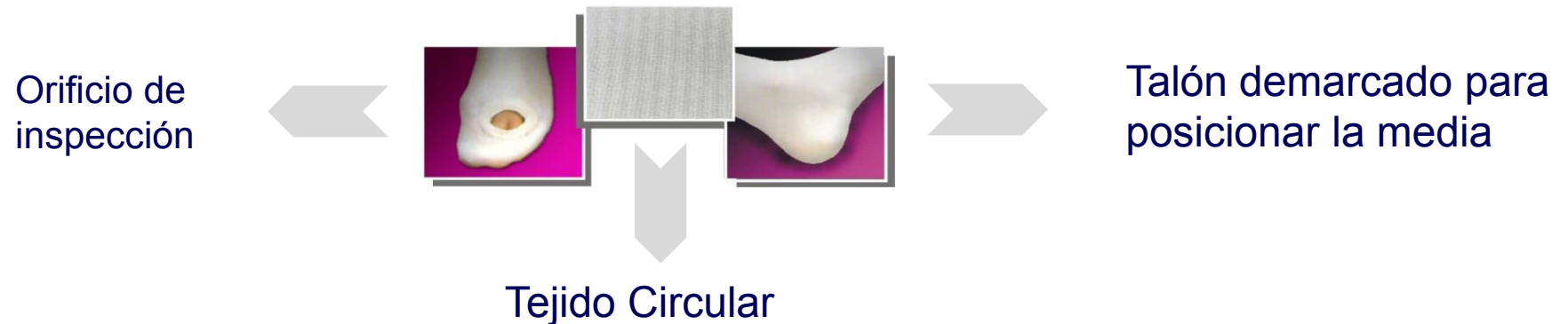



¡Lo mas reciente!



Calcetín Premium Algodón (41)

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826



- ❑ Calcetín para caballero con Algodón (contiene hilos naturales)
- ❑ El Algodón hilo agradable al tacto permite transpiración y resistencia al calor 30%
- ❑ Nailon Gran capacidad de absorción de humedad 63%
- ❑ Refuerzo en talón y puntera
- ❑ 15 -20 mm Hg
- ❑ La pueden utilizar pacientes diabéticos con prescripción




Calcetín Hombre Jaspado

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826



Diseño Jaspado

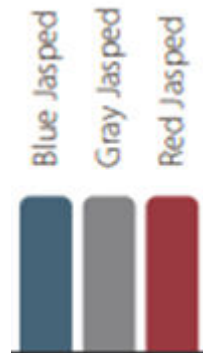


- ❑ Calcetín para caballero
- ❑ Nailon Gran capacidad de absorción de humedad 90%
- ❑ Elastano 10%
- ❑ Refuerzo en talón y puntera
- ❑ Colores de moda
- ❑ Hilos binados que dan apariencia jaspado
- ❑ 15 -20 mm Hg

Calcetín Hombre Hilos de Plata




- ❑ Calcetín para caballero Anti microbial
- ❑ Contiene 12% de hilos de plata Actúa como antimicótico
- ❑ Previene hongos, pie de atleta
- ❑ Mas fresca que una media de Nailon
- ❑ Muy elásticas y de fácil colocación
- ❑ Disponible en Black y Navy
- ❑ Bienestar, Elegancia y Confort
- ❑ 15-20 mmHg

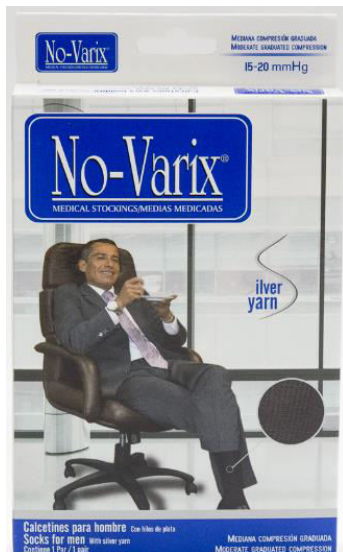

Calcetín Hombre Hilos de Cobre

No-Varix®
MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

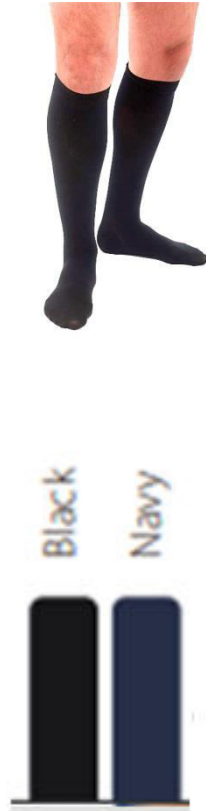


- ❑ Calcetín para caballero con infusión de cobre
- ❑ Contiene 36% algodón, 22 % cobre elastómero en infusión.
- ❑ La infusión de cobre ayuda a prevenir el pie de atleta el mal olor y la humedad
- ❑ Muy elásticas y de fácil colocación
- ❑ Disponible en Black y Navy
- ❑ Bienestar, Elegancia y Confort
- ❑ 15-20 mmHg



NV-X
SPORT®
== COMPRESSION WEAR ==

- Línea deportiva de prendas de Compresión graduada
- Aceleran la recuperación muscular
- Mejoran el rendimiento físico


¿Cómo Funciona la Compresión Graduada?

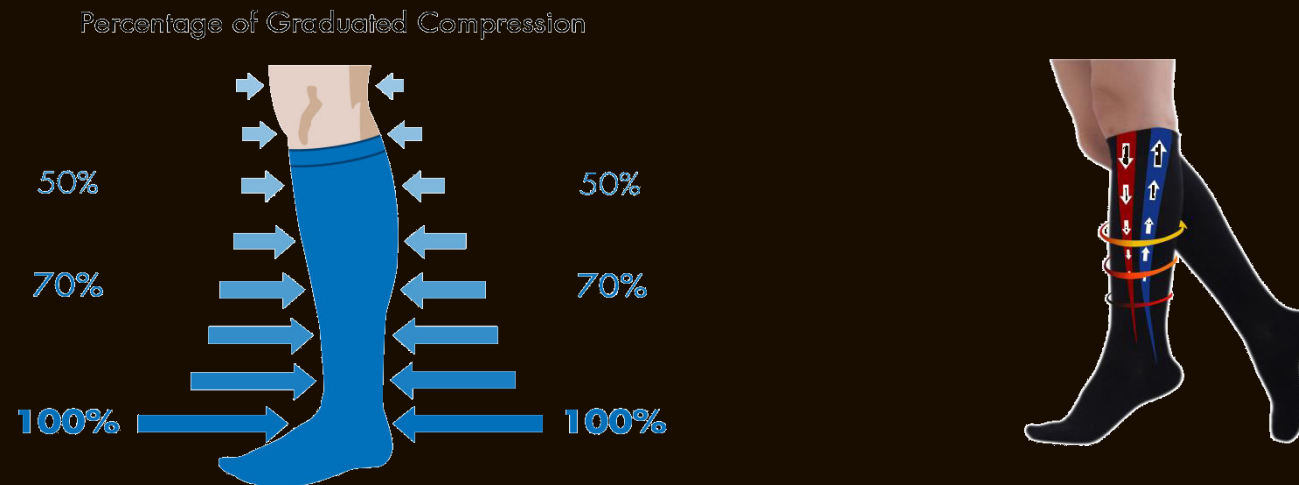



Beneficios

- Ideal para cualquier deporte y actividad física
 - Ayuda a reducir la inflamación
 - Variedad de colores y atractivos diseños
- Permite una movilidad completa del deportista
- Optimizan el uso del Oxígeno, aumentan la resistencia
- Previenen calambres y dolores musculares después de la actividad física
- Ayudan a la pronta recuperación después del entrenamiento y la practica deportiva

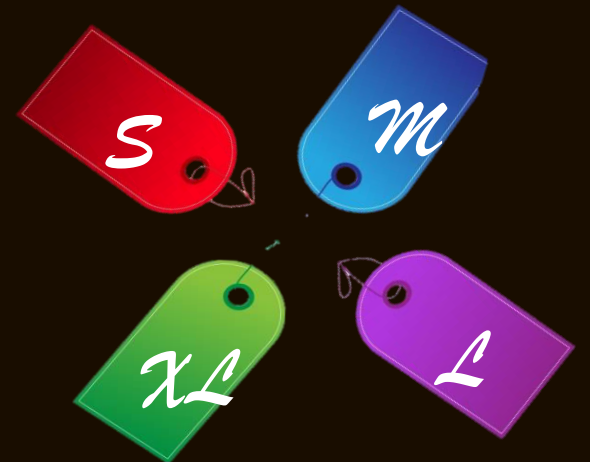



- Se pueden usar en entrenamiento como en la propia competición


- Mejoran la distribución del flujo sanguíneo.

Consiguiendo una mejor oxigenación de los tejidos, favoreciendo de este modo la recuperación.

- Al mejorar la recuperación del atleta, se reducirán los dolores musculares, la fatiga y la oxigenación



- Mejorará igualmente, el drenaje de las toxinas que se acumulan tras el esfuerzo en el sistema circulatorio.

- Evitan la pérdida de calor en la zona

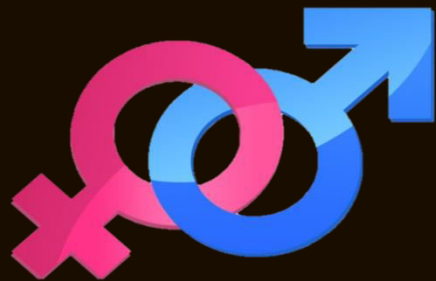




Calcetines

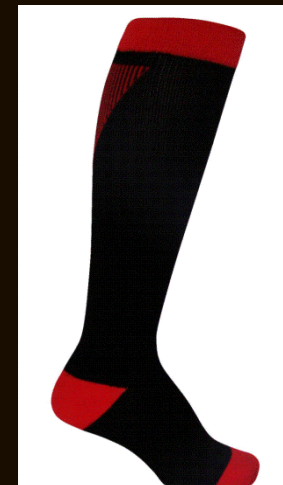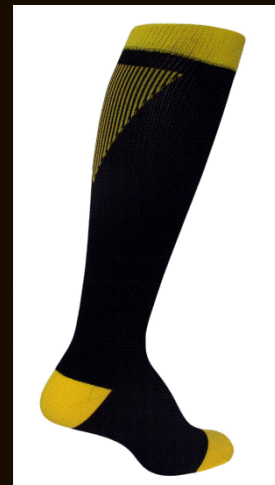



Pantorrilleras

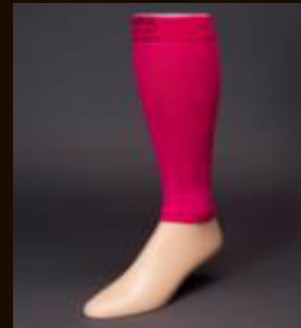



Mangas



PARAMETROS DE MEDIDAS

Parámetros de medidas

Hasta la Rodilla




	11" (28cm)	12" (30,5cm)	13" (33cm)	14" (35,5cm)	15" (38cm)	16" (40,5cm)	17" (43cm)	18" (45,5cm)
14"(35,5cm)	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	L/G	L/G	L/G
15"(38cm)	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	M	L/G	L/G	L/G
16"(40,5cm)	S/CH/P	S/CH/P	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG
17"(43cm)	S/CH/P	M	M	M	M	L/G	XL/EG	XL/EG
18"(45,5cm)	M	M	M	M	L/G	XL/EG	XL/EG	XL/EG
19"(48cm)	M	M	M	M	L/G			

S/CH/P: Small/Chica/Pequeña M: Medium/Mediana L: Large/Largo XL/EG: X-Large/Extra Grande


Hasta el muslo y Pantimedia

Relación peso y estatura

- Small/Chica/Pequeña
- Medium/Mediana
- Large/Largo
- X-Large/Extra Grande
- Queen/Super Grande

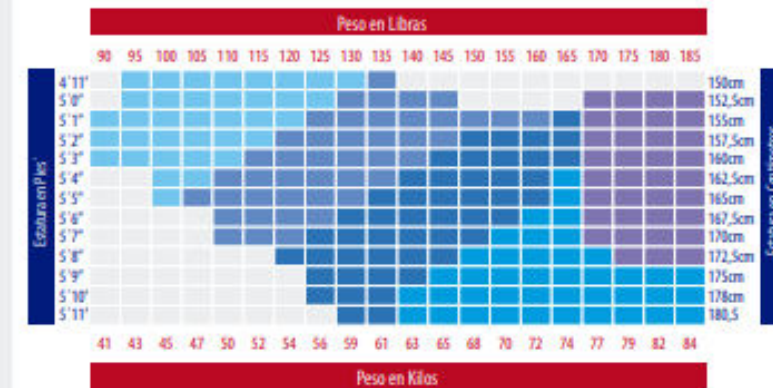

Medias T.V.P

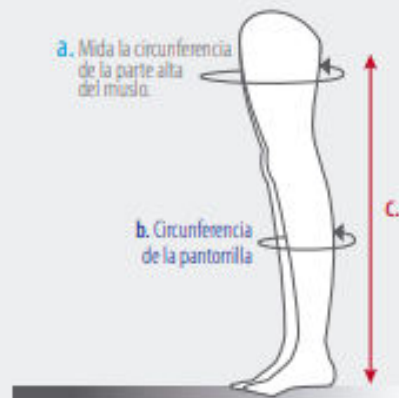

a. Mida la circunferencia de la parte alta del muslo.

b. Circunferencia de la pantorrilla

c.

b. Mida la circunferencia de la pantorrilla.

c. Mida el largo desde el talón al pliegue del glúteo.

	SMALL CHICA - PEQUEÑA REGULAR	MEDIUM MEDIANA REGULAR	LARGE GRANDE REGULAR	X-LARGE EXTRA GRANDE REGULAR
b.	< 30,5 cm	(a.) 30,5 - 38,1 cm	(a.) 38,1 - 44,5 cm	> 44,5 cm
c.	(a.) 73,7 - 83,8 cm	(a.) 73,7 - 83,8 cm	(a.) 73,7 - 83,8 cm	> 83,8 cm

No-Varix®


MEDICAL STOCKINGS/MEDIAS MEDICADAS

R.S. INVIMA 2009DM-0003826

Ref. 1048 Manga Linfedema

Punto de medida	SMALL CHICA-PEQUEÑA	MEDIUM MEDIANA	LARGE GRANDE	X-LARGE EXTRA GRANDE
C	18 - 21 cm	20 - 23 cm	20 - 25 cm	24 - 27 cm
C1	15 - 17 cm	17 - 19 cm	19 - 21 cm	22 - 25 cm
D	21 - 26 cm	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 28 cm
F	30 - 35 cm	34 - 40 cm	40 - 45 cm	46 - 50 cm
C1 hasta G*	41 - 45 cm	41 - 45 cm	45 - 49 cm	45 - 49 cm


*2cm por debajo de la axila

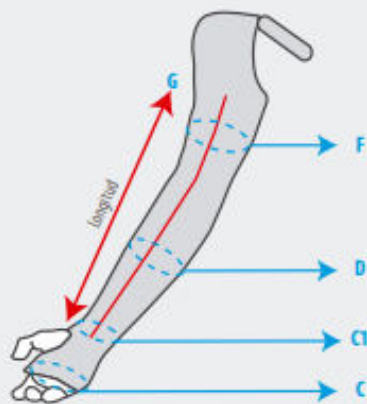

Ref. 1148 Manga Linfedema

Punto de medida	SMALL CHICA-PEQUEÑA	MEDIUM MEDIANA	LARGE GRANDE	X-LARGE EXTRA GRANDE
C1	15 - 17 cm	17 - 19 cm	19 - 21 cm	22 - 25 cm
D	21 - 26 cm	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 28 cm
F	30 - 35 cm	34 - 40 cm	40 - 45 cm	46 - 50 cm
C1 hasta G*	41 - 45 cm	41 - 45 cm	45 - 49 cm	45 - 49 cm

*2cm por debajo de la axila

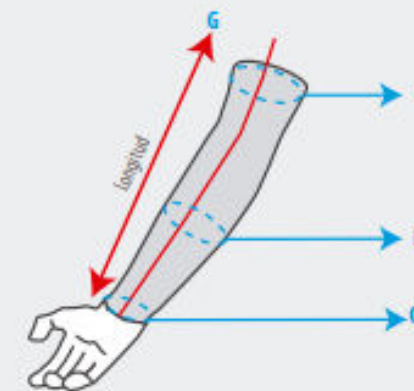

Códigos -color -talla -referencia

Código de Colores

Código	Color	Ref. 24 - 26	Ref. 1134
0	Beige	N.A.	Brown
1	Negro	N.A.	Black
2	Azul	Ligth Blue	
3	Café o Gris (transp)	Púrpura	Vison
4	Visón o Gris (calcetín)	Pink	Pink
5	Blanco	White	White
6	Sahara	Aquamarine	Navy
7	Negro Claro	Fucsia	
8	Negro Verde	Pistachio	Gray
9	Taupe	Violet	Púrpura

Código de Tallas

Código	Talla	Ref. 1134
1	XS-XCH-XP	N.A.
2	S/CH/P	S-M
3	M	N.A.
5	L/G	L-XL
6	XL/XG	N.A.
7	QUEEN	N.A.
8	XXL/XXG	N.A.
9	XXXL/SXG	N.A.

Código de Color Ref. 55, 63 y 69

Código	Color
3	Gris

Código de Color Ref. 21

Código	Color
7	Gris

Código de Color Ref. 66, 56 y 59

Código	Color
4	Gris
7	Burgundy
8	Green
9	Kaky

Código de Color 1166

Código	Color
2	Blue Jasped
4	Gray Jasped
7	Red Jasped

Los códigos referenciados corresponden a:

1010/11
↓

60
↓

2
↓

3
↓





Quien debe usar medias compresión graduada?

Casi todos, desde la secretaria que pasa todo el día sentada
Hasta las profesiones que implican estar de pie:

- Cheff
 - Profesores
 - Profesionales de la salud
 - Comerciantes
 - Maestros
 - Operarios
 - Aerolíneas
 - Visitadores Médicos
-
- Pacientes con T.V.P, úlceras varicosas, edema intenso, cambios de coloración en la piel o varices.

Quien NO debe usar medias compresión graduada?



- **Enfermedades arteriales:** la compresión de unas arterias con lumen reducido provocaría una disminución ulterior del flujo sanguíneo, causando dolor y la disminución de la aportación de sangre; y en general trastornos de la circulación arterial.
- **Diabetes con neuropatías:** Daño en los nervios periféricos, como consecuencia de la alteración del metabolismo glucídico;
- **Dermatosis húmeda:** piel enrojecida con abrasiones en la superficie, que secretan líquido seroso;
- **Úlcera de la piel en curso:** no causada por insuficiencia venosa o que no hayan sido valoradas por el especialista,

Marcas de medias medicadas de compresión graduada, en el mundo



SIGVARIS[®]



- **Ke-nal** - **México**
- **Regina** - **México**
- **Venasan** - **Guatemala**
- **Prevent** - **U.S.A.**
- **Lauda** - **Argentina**
- **Venotrain** - **U.S.A**



JOBST[®]



Juzo[®]



medi
STRUMPF[®]



Gloria[®]

Grupos objetivo:



Médicoas/as



Objetivo:

- Cirujanos vasculares
- Flebólogos
- Deportólogos
- Extrahospitalario: sólo formuladores clave, MG
- Programas de salud para pacientes crónicos


Enfermeras/os



Objetivo:

- Enfermeras de clínicas de heridas
- Enfermeras de programas de promoción y prevención
- Enfermeras de atención en casa


Jefes/as de compras

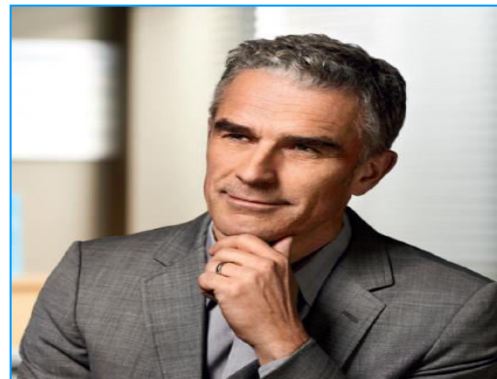

Objetivo:

- En hospitales
- En retail médico
- Almacenes especializados en salud

Pacientes / Usuarios

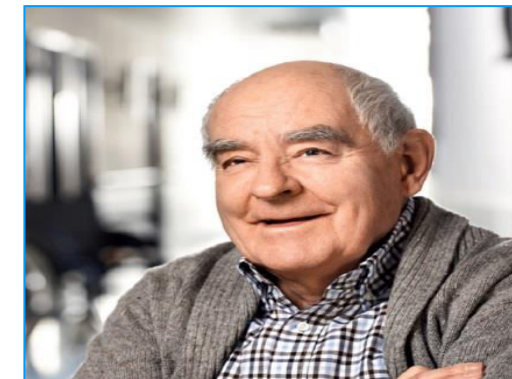

Objetivo:

- En hospitales
- En retail médico
- Programas de salud y bienestar para empresas

Puntos claves



- Disponible en cuatro clases de compresión
- Cuatro estilos diferentes (Rodilla, Muslo, pantymedia, Calcetín).
- Amplia variedad de colores
- Dos texturas:Transparente y opaca
- Dos opciones: con Puntera y sin Puntera
- No es solo cosa de mujeres
- Confortables y elegantes
- Piernas bellas y saludables

Exhibición de productos No-Varix®

Propuesta Exhibición Horizontal



Propuesta Exhibición Vertical





1.05 cm.

1.80 cm.

BRM Medical Solutions





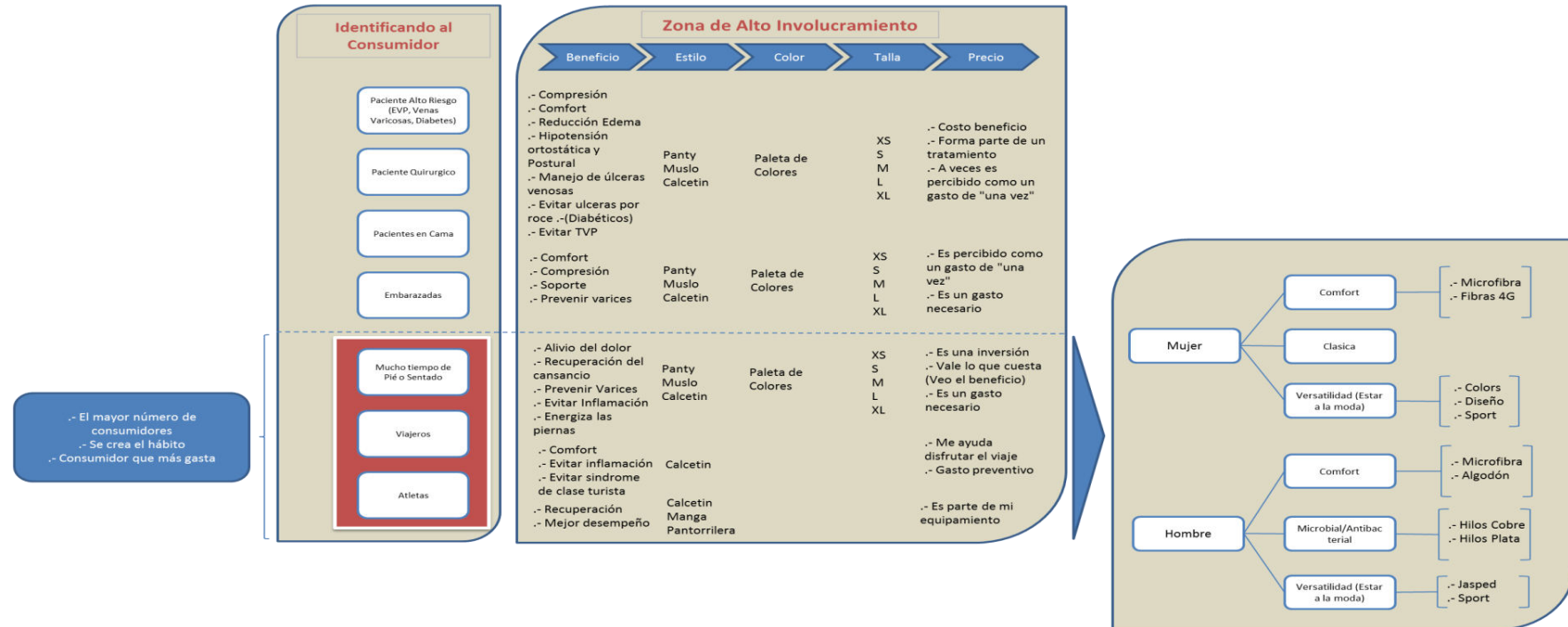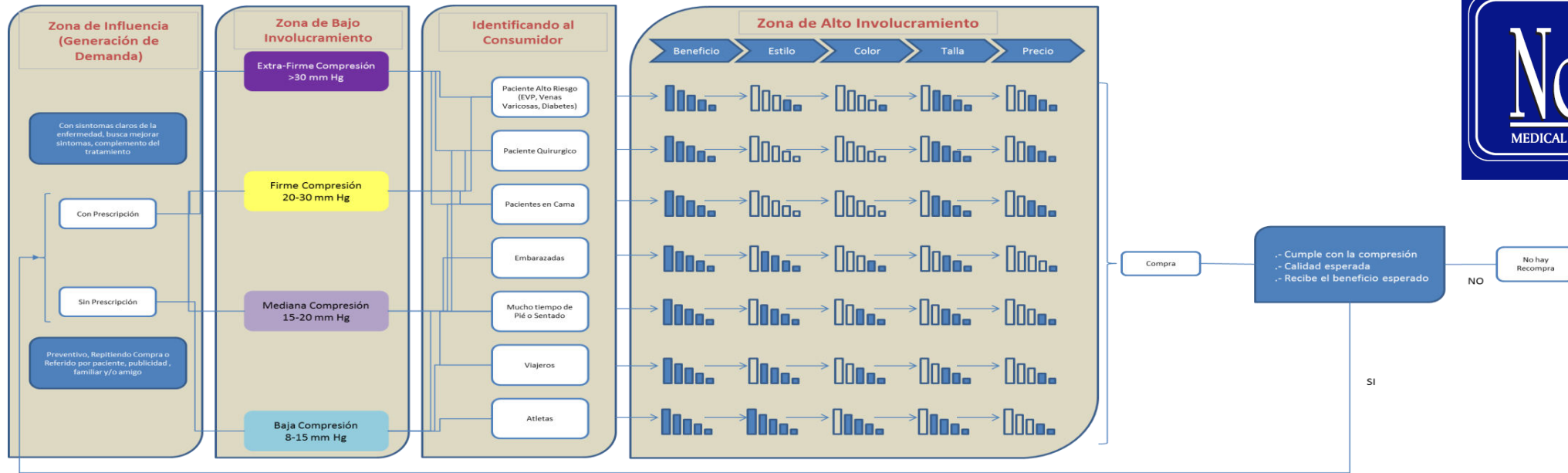

Zona de Influencia (Generación de Demanda)

Con síntomas claros de la enfermedad, busca mejorar síntomas, complemento del tratamiento

Con Prescripción

Sin Prescripción

Preventivo, Repitiendo Compra o Referido por paciente, publicidad, familiar y/o amigo

Generación de la Demanda

- Es el primer paso de la compra
- Influenciadores “Siembran” la marca
 - ✓ Médicos
 - ✓ Conocidos (amigos, familiares, etc)
 - ✓ Líderes de Opinión
- Concentración de esfuerzos promocionales

**Zona de Bajo
Involucramiento**

Extra-Firme Compresión
>30 mm Hg


Firme Compresión
20-30 mm Hg

Mediana Compresión
15-20 mm Hg

Baja Compresión
8-15 mm Hg



Define Compresión


- Definida por dos factores:
 - ✓ Prescripción médica (sin discusión)
 - ✓ Necesidad (el valor de la compresión es dada por el uso para el que se requiere la prenda)

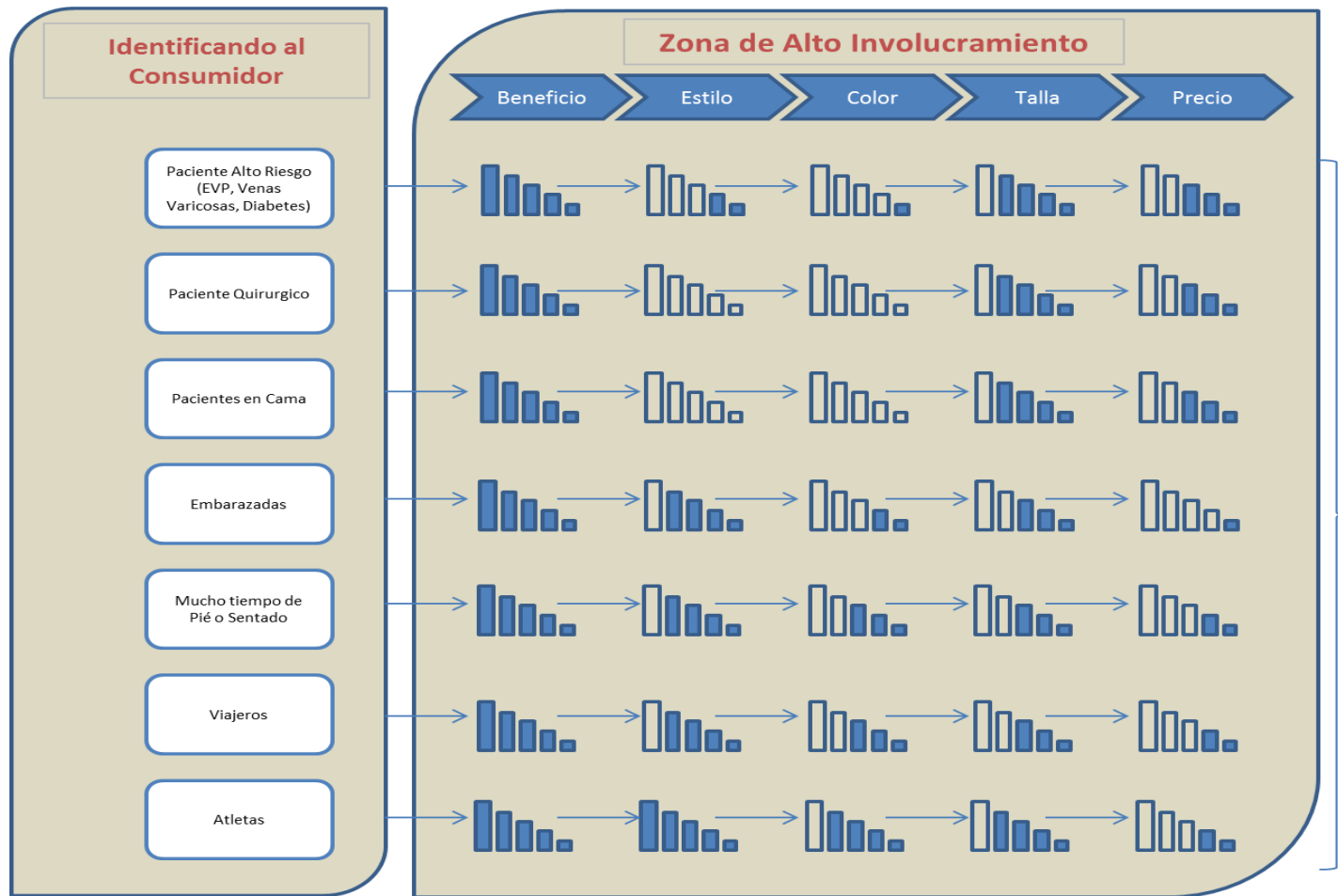

Identifica al Paciente y Necesidad

- El paciente se enfrenta con lo que “quiere o necesita”
- 5 factores para la toma de decisión
- Las necesidades pueden ser mixtas
- La edad, estado de salud, ubicación geográfica, estilo de vida y sexo son fundamentales en esta etapa

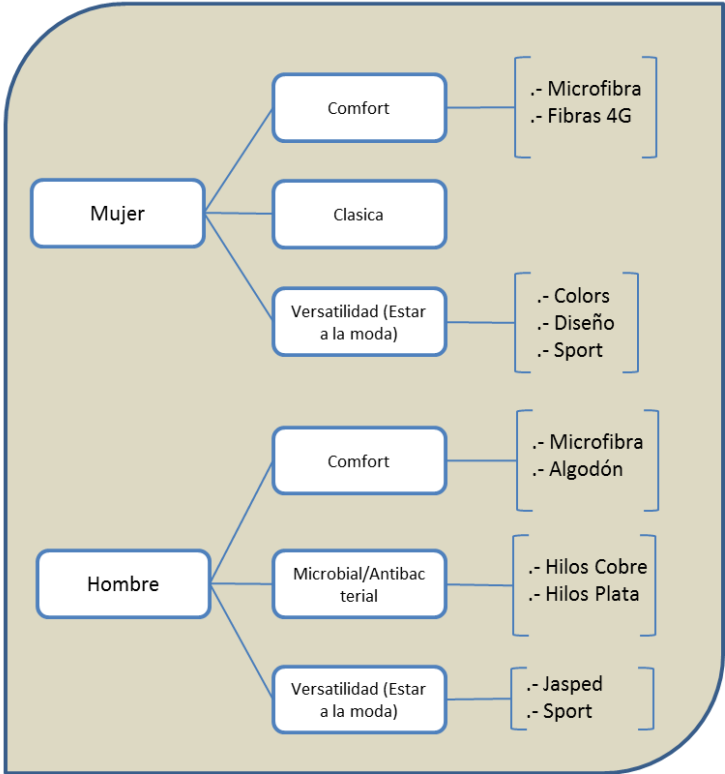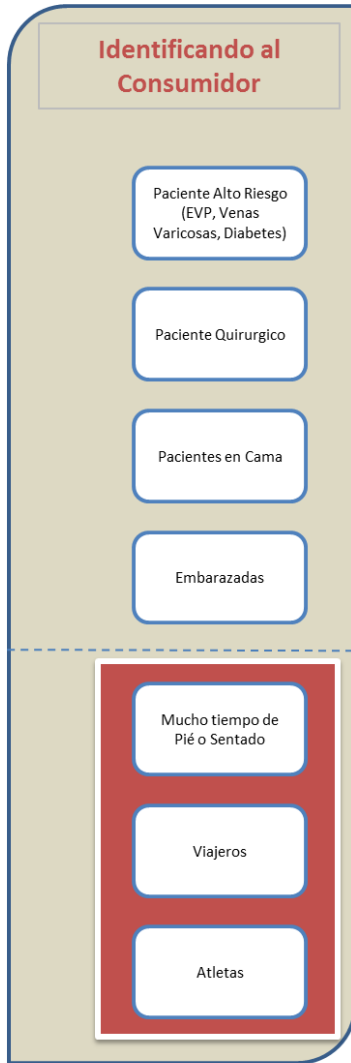

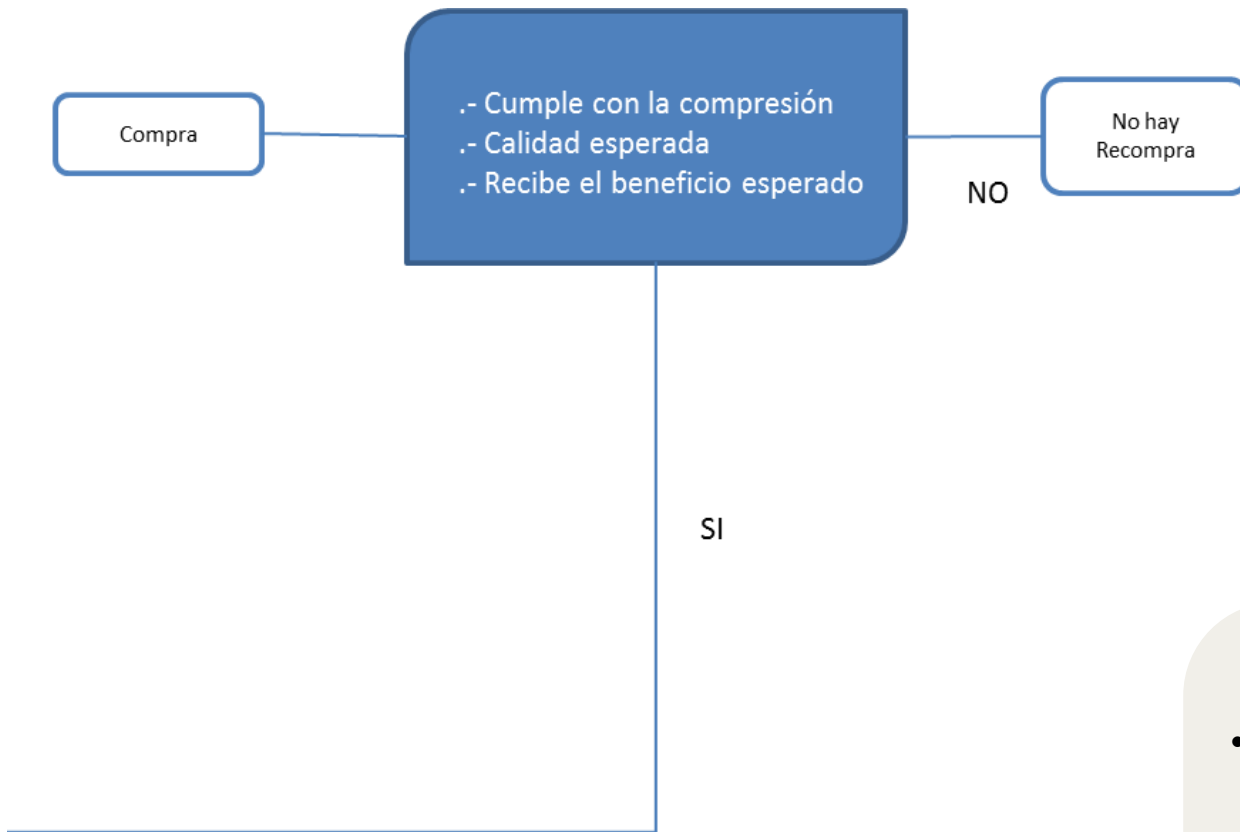

Satisfacción / Expectativas

- Es la fase en que el consumidor evalúa:
 - ✓ Beneficio / Costo
 - ✓ Marca
 - ✓ Servicio
 - ✓ Calidad
 - ✓ Opciones

Decisión de Compra

NECESARIO +
PREVISTO



- Dirigen a los visitantes en la búsqueda de otros artículos.
- Los ubica el cliente en la zona Fría.
 - Se llega a ellos luego de un recorrido importante o largo de la tienda.
 - El producto se vende por sí solo.



RUTINA

DESEADO +
PREVISTO



- Son deseados y su compra es planificada.
- El consumidor compara ofertas en varias tiendas antes de comprarlos.
- **La venta esta muy sujeta al servicio pre y post venta (garantías, servicio, asesorías, etc).**



DESTINO

NECESARIO+
IMPREVISTO



- No sabe que lo necesita hasta que lo ve. No conoce el modelo, marca e incluso ,el producto que comprará.
- Son productos complementarios.
 - Los ubica el cliente en la zona caliente.



CONVENIENCIA


DESEADO +
IMPREVISTO



- Son productos deseados pero el consumidor no ha previsto su compra.
- Los ubica en cliente en la zonas calientes ya que su venta está sujeta a que el consumidor los vea.
- Desencadenan compras por impulso.



IMPULSO

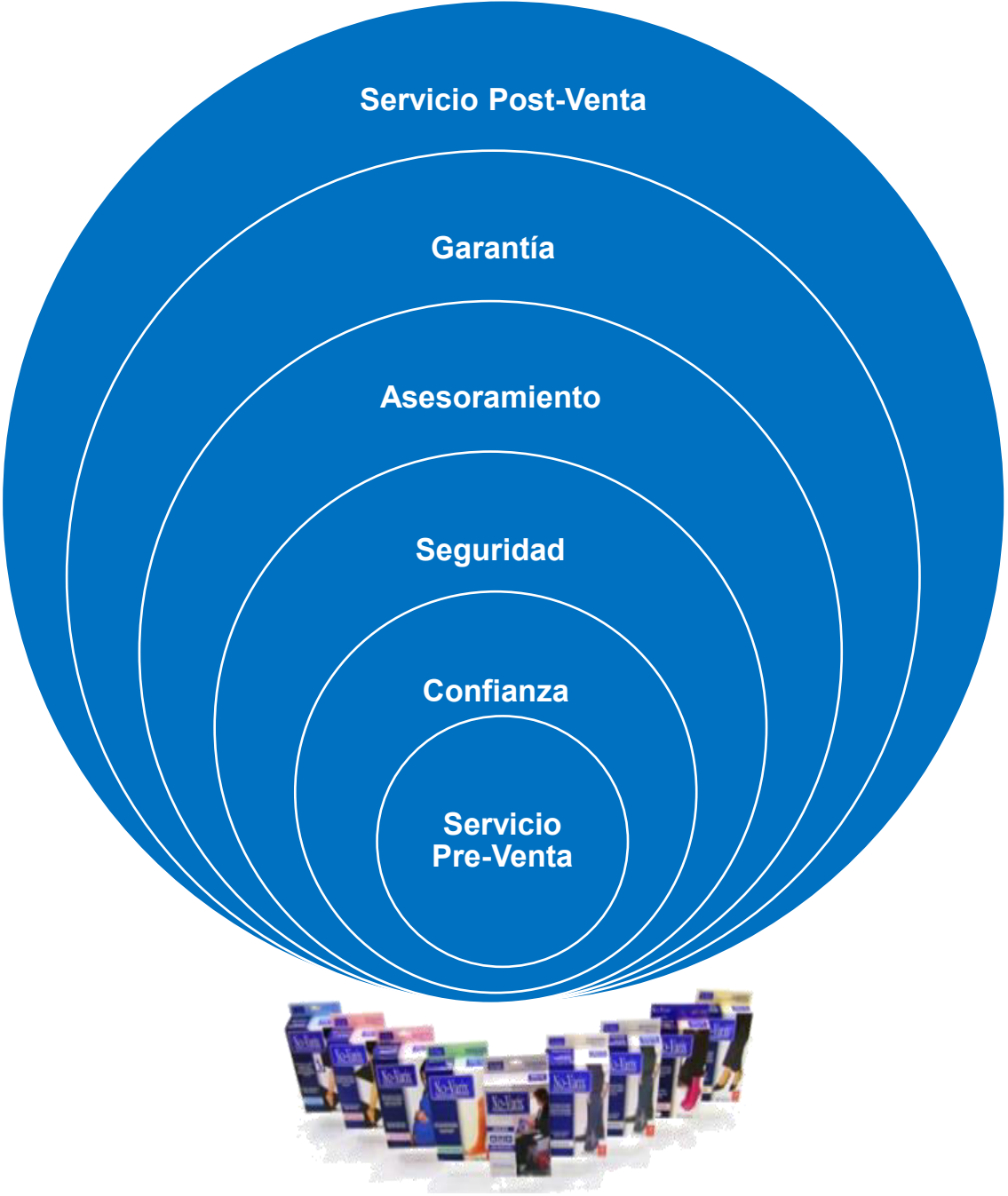

BRM Medical Solutions

ÉSTE ES EL VERDADERO

PING PONG STUDIO

SECRETO DEL ÉXITO

Persuasum

Ping Pong Studio